


Roger MyLink

Die Roger Hörlösung besteht aus drei Hauptteilen:
Roger MyLink, den Hörgeräten und einem Roger Mikrofon, wie zum Beispiel dem Roger Pen.

Das Roger-Mikrofon sendet die Stimme des Sprechers drahtlos, mittels Roger MyLink zu den Hörgeräten des Empfängers. Es muss nur die T-Spule in den Hörgeräten aktiviert sein.

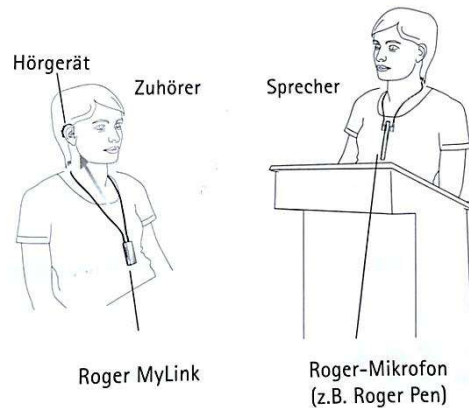

MyLink kennenlernen:

- ① Lautstärkenkontrolle
- ② Ein-/Aus-Taste



- ① Ladebuchse
- ② Kopfhörerbuchse (2,5 mm)



Statusanzeige:

- ① Batterie fast leer
- ② Batterie vollkommen leer
- ③ Batterie wird aufgeladeng
- ④ Batterie ist vollständig aufgeladen
- ⑤ Lautstärkenkontrolle Minimum-, Maximumposition
- ⑥ Lautstärkenkontrolle mittlere Position



Inbetriebnahme:


1. Roger MyLink aufladen



- Mit einer vollständig aufgeladenen Batterie, kann Roger MyLink für mehr als 10 Stunden benutzt werden.
- Roger MyLink kann mit einem angeschlossenen Ladegerät nicht benutzt werden.

2. Induktionsschleife entkoppeln
Roger MyLink umhängen/
Induktionsschleife wieder koppeln

3. Roger MyLink einschalten

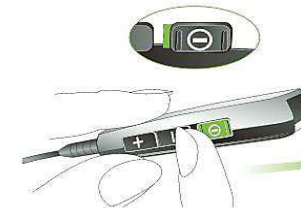

4. T-Spulen Programm am Hörgerät aktivieren (muss zuvor vom Hörgeräteakustiker eingerichtet worden sein)

5. MyLink mit dem Mikrofon verbinden: dazu Roger MyLink innerhalb eines Abstandes von 10cm vom Mikrofon halten und am Mikrofon „Verbinden“ drücken.
Dies ist nur notwendig bei der ersten Koppelung!