


## Phonak Roger Touchscreen Mic

### Lautsprecher (Roger Digimaster)

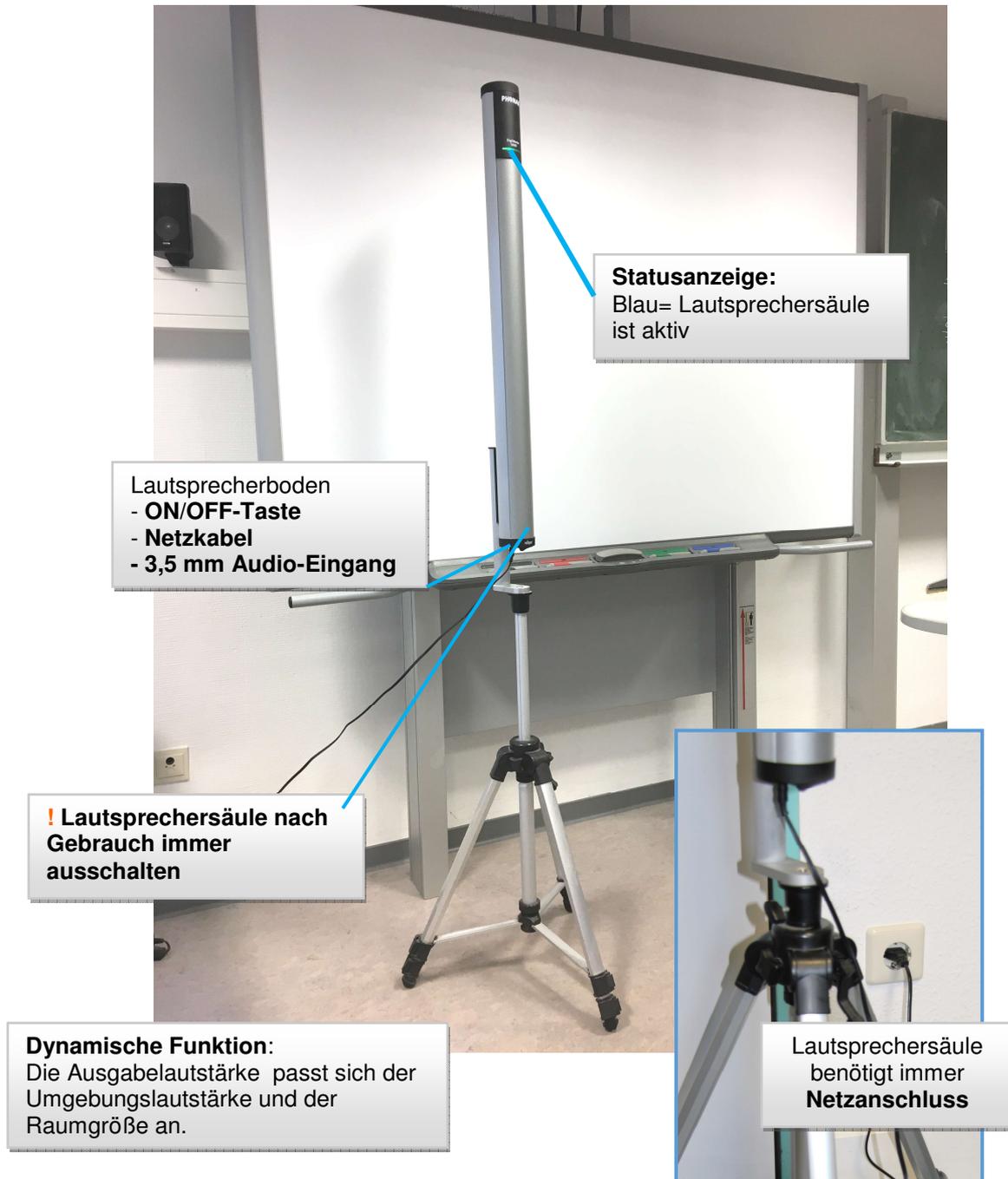

## Phonak Roger Touchscreen Mic

### Lehrersender (Roger Touchscreen Mic)



- Die Mikrofone funktionieren nur in Verbindung mit dem Lehrersender.
- Der Lehrersender kann für Kleingruppen auf dem Tisch liegend auch als Mikrofon genutzt werden. Hierbei sind die Schülmikrofone und die Lautsprechersäule deaktiviert.
- Die Übertragung der Beiträge kann zeitgleich über den Lehrersender und ein Schülmikrofon erfolgen.
- Nach Gebrauch die Geräte ausschalten und durchgängig laden.
- Zubehör: Schutzfolie + Schutzhülle (Phonak)  
Zusätzliche Halstragebänder können für 15€ erworben werden.

## Phonak Roger Touchscreen Mic

### Schülermikrofon (Roger Pass-around)



#### Statusanzeige:

- Grün= Stimme wird übertragen
- Rot= gesperrt
- Blau=
  - nicht verfügbar (Lehrersender ist aus)
  - Mikrofon ist nicht verbunden (aus der Geräteliste am Lehrersender entfernt)
  - Mikrofon liegt auf dem Tisch und schaltet automatisch stumm

#### Tischstativ

! Mikrofon passgenau in das Stativ einsetzen

ON/OFF-Taste 3 Sek. drücken

#### Sprechtaste

Die Funktion der Sprechtaste wird über die „Push to talk“ –Einstellung am Lehrersender aktiviert!

- Kurz drücken: Sprechtaste on
  - Dauerhaft drücken: Mikrofon überträgt die Stimme
  - Erneut kurz drücken: Sprechtaste off
- Ist die „Push to talk“ –Einstellung am Lehrersender deaktiviert, ist die Sprechtaste am Mikrofon ohne Funktion



#### Lautstärkeregulierung +/-

Die Funktion der Lautstärkeregulierung wird über den Lehrersender aktiviert.

- Mikrofon wird automatisch stumm geschaltet sobald es auf den Tisch gelegt wird.
- Mikrofon erhöht automatisch die Lautstärke wenn es mit Tischstativ benutzt wird.
- 5-10 cm Entfernung zum Mund einhalten.
- Mit Tischstativ 30-40 cm Abstand zum Mund.
-

## Phonak Roger Touchscreen Mic

### Zusatzinformationen

Dynamic Soundfield mit Roger Touchscreen-Mic und  
Pass-around Schülmikrofon

### Einsatz des Lehrersenders für die Gruppenarbeit.

Das Touchscreen-Mic hat einen automatischen Mikrofonmodus, der selbstständig zwischen der Funktion als Umhängemikrofon und einem Kleingruppenmodus umschaltet.

Der Kleingruppen-Modus wird aktiviert, sobald das Mikrofon flach auf dem Tisch liegt. Er deaktiviert die Übertragung zum Lautsprecher und die Verbindung zu den Pass-around Schülmikrofonen, was daran zu erkennen ist, dass Lautsprecher und Schülmikrofone blau blinken. Die Übertragung erfolgt dann ausschließlich zu den individuellen Empfängern der Schüler\*innen mit Hörbeeinträchtigung.



### Der Tischständer

Wenn ein Pass-around Schülmikrofon erkennt, dass es im Mikrofonständer steht, erhöht es seine Empfindlichkeit so weit, dass die Sprache des Kindes auch bei einem Abstand von 30-50 cm ausreichend laut übertragen wird.



**WICHTIG!** Stehen Pass-around Schülmikrofone dauerhaft im Mikrofonständer, schalten sie sich nicht stumm und können jederzeit durch Störgeräusche aktiviert werden.