

## Informationen Hörtechnik–Phonak Roger–Soundfield

Die Lautstärke der Soundfieldsäule kann an den **Sendern Inspiro** oder **Touchscreen Mic** eingestellt werden.

### Bedienung Phonak Inspiro

- Taste ok
- Soundfield ok
- Volumenkontrolle
- gewünschte Lautstärke
  - mit der „auf“ und „ab“ Taste wählen,
- zum Hauptbildschirm zurück springen
  - mit der „Pfeil nach links“ Taste (zurück)



### Bedienung Touchscreen Mic:

- Einmal nach links wischen
- Soundfield antippen
- Lautstärke einstellen
- danach zurück